


# Instrucciones de envío



1


Rellenar el formulario de consentimiento.

MB230124xxx

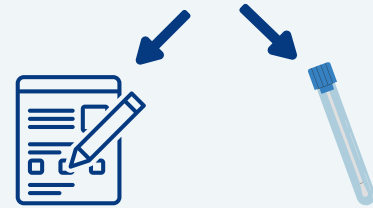


2

Pegar un código en el tubo con la muestra y otro código en el formulario de consentimiento.

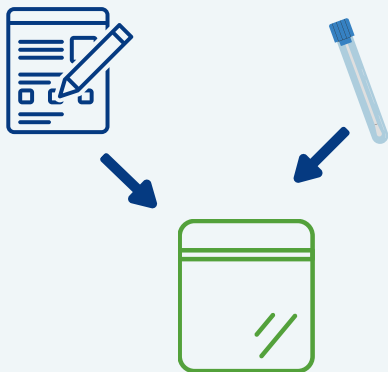

3

Colocar la muestra en la bolsa verde, en el compartimento destinado para ello. Colocar el formulario de consentimiento en el otro compartimento de la bolsa verde.

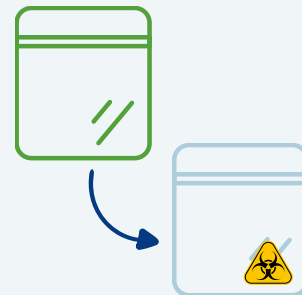


4

Introducir la bolsa verde (con la muestra y el consentimiento) en otra bolsa transparente con etiqueta de riesgo biológico.



5

Colocar la bolsa transparente dentro de la caja del kit.  
Meter la caja en la bolsa de envío.

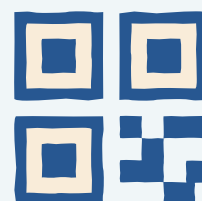

6

Escanear el código QR para gestionar el envío.